

ANIOSYME5 SYNERGY



5 ENZIMAS PARA 1 PRODUCTO ÚNICO

INDICACIONES

Limpieza del material quirúrgico y médico, de los endoscopios y productos sanitarios, en remojo, bandeja ultrasonica, lavadora automática y túnel de lavado.

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN INSTRUMENTACIÓN




1

Disolución de 0.1% al 0.5 %: para una dosis de 25 ml en 5 litros de agua fría o tibia.



3

Enjuagar cuidadosamente

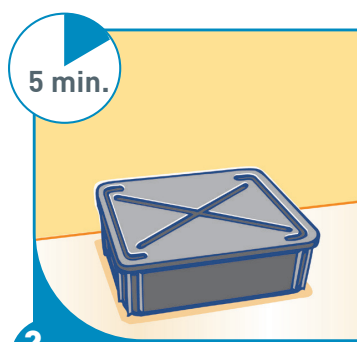

2

Sumergir totalmente el dispositivo médico.
Tiempo de remojo recomendado: 5 minutos
Cepille la parte interior y exterior del dispositivo médico en caso necesario.

► Material termosensible:

Vaya al paso siguiente
(vea el protocolo establecido por el servicio)

► Material esterilizable con autoclave:

Secar con una toalla limpia. Vaya al siguiente paso
(vea el protocolo establecido por el servicio).

- Lávese las manos y utilice una máscara y guantes limpios desechables.
- El equipo de limpieza (cepillos y cepillos de limpieza del endoscopio) debe ser de un solo uso.
- Respete los tiempos de contacto del producto y las disoluciones.
- Aclare, limpie y desinfecte entre cada uso los productos de baño de la mesa de laboratorio.



Laboratoires
ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

