

ANIOSYME PRIME



**Detergente y
desinfectante
del instrumental**



- **Fórmula que asocia 2 conceptos de eficacia patentados**
- **Evita que se sequen las manchas**
- **Eficacia antimicrobiana a partir de los 15 minutos**
- **Espuma densa: cobertura uniforme del instrumental**
- **Gran compatibilidad**

INDICACIONES

Tratamiento previo del instrumental médico-quirúrgico con espuma: durante un transporte en modo no húmedo o almacenamiento del instrumental sucio antes del lavado en máquina o el lavado manual. Mantiene la humedad suficiente para evitar que la sangre o las materias orgánicas se sequen.

CARACTERÍSTICAS

- Complejo trienzimático: proteasa, lipasa, amilasa, combinado con agentes tensoactivos
- No corrosivo para los materiales
- Sin producción de aerosol lo que evita cualquier riesgo de emanación del producto
- Producto listo para utilizar, forma ergonómica con pistola de pulverización
- pH del producto: 8 +/- 0,5
- Facilita el desprendimiento de la suciedad al aclarar y/o lavar
- Estabilidad enzimática demostrada
- Fácil de aclarar

**LISTO
PARA USAR**



ANIOSYME PRIME

Detergente y desinfectante del instrumental

MODO DE EMPLEO



1

Pulverizar previamente ANIOSYME PRIME sobre el fondo de la cubeta de remojo y depositar en ella el instrumental correspondiente.



2

Recubrir de espuma todo el instrumental.



3

Tapar el recipiente con ayuda de la tapadera.



4

Aclarar los instrumentos antes de proceder a la limpieza en máquina o a mano.

COMPOSICIÓN

Carbonato amónico cuaternario, tensoactivos no iónicos, complejo enzimático (proteasa, lipasa y amilasa), agente quelante y excipientes.

PRECAUCIONES DE USO

Peligroso. Respete las precauciones de uso (establecidas por las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos).

Almacenamiento : entre +5°C y + 35°C.

Dispositivo médico de la clase IIb (Directiva 93/42/CEE modificada).

ACONDICIONAMIENTOS

1 12 frascos de 750 mL.....Ref. 2367.544

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Activo en	Normas	Tiempo de contacto
Bacterias	EN 1040, EN 13727, EN 14561 EN 13727 activo frente a BMR	15 minutos
Mycobacterias	M. terrae : EN 14348, EN 14563	30 minutos
	M. avium : EN 14348, EN 14563	60 minutos
Levaduras	EN 1275, EN 13624, EN 14562	15 minutos
Virus	Según EN 14476+A1 PRV (virus modelo HBV) BVDV (virus modelo HCV) Herpesvirus, HIV-1, Vaccinia virus	5 minutos



1